


راهنمای کار با دستگاه الکتروشوک ZOLL R series

شماتیک کلی دستگاه

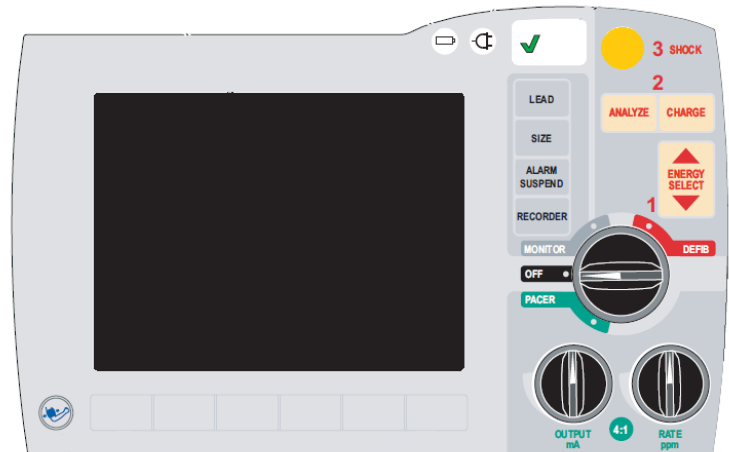

۱- در ابتدا با چرخاندن کلید سلکتوری در جهت عقربه ساعت، حالت DEFIB را انتخاب نمایید.

۲- در مرحله بعد با استفاده از دکمه مقابل مقدار انرژی مورد نیاز را تنظیم نمایید.

۳- جهت شارژ شدن انرژی دکمه CHARGE را فشار دهید.

۴- در نهایت جهت اعمال شوک کلید شوک بر روی دستگاه یا کلید شوک بر روی پدل ها را همزمان فشار دهید.

شوک دادن سینگرونایز

کلید انتخاب مود را بر روی DEFIB قرار داده و پس از آن مقدار انرژی را انتخاب نمایید. پس از آن کلید SYNC ON/OFF را فشار داده تا دستگاه بر روی سنکرون قرار گیرد.

در نهایت کلید شارژ را زده و پس از مشاهده پیغام ***J READY SYNC عمل تخلیه انرژی بر روی بیمار را انجام دهید.

نکته: در این حالت تا زمانی که دستگاه قله R را تشخیص ندهد، عمل تخلیه انجام نمی شود.

مراحل انجام تست روزانه دستگاه

۱- کلید سلکتوری را بر روی DEFIB قرار دهید.

۲- مقدار انرژی را بر روی 30J تنظیم کنید.

۳- دکمه شارژ را فشار دهید تا مقدار انرژی مورد نظر شارژ شود.

۴- در نهایت با استفاده از دکمه شوک بر روی دستگاه یا فشردن دکمه شوک بر روی پدل ها به صورت همزمان انرژی را بر روی دستگاه تخلیه نمایید.

۵- در نهایت در صورت کارکرد صحیح دستگاه، پیغام TEST OK بر روی دستگاه ظاهر می گردد.