


راهنمای کاربری دستگاه نوار قلب ZONECARE ZQ-1203G

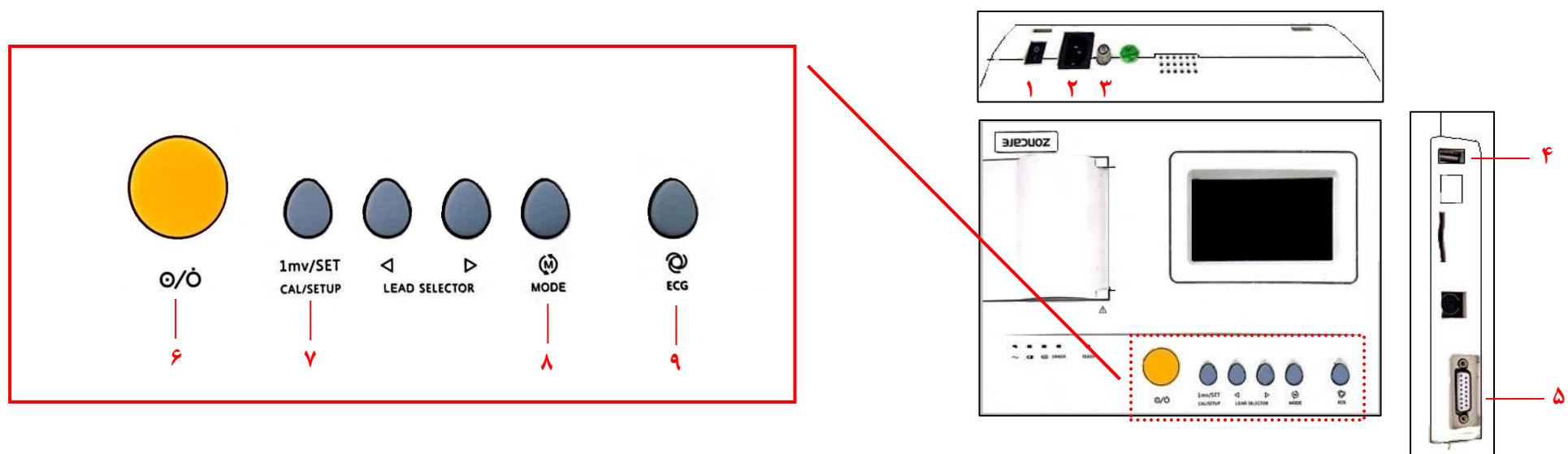

۱- کلید قطع و وصل تغذیه	۲- درگاه اتصال کابل تغذیه	۳- محل اتصال کابل زمین
۴- درگاه اتصال USB	۵- درگاه اتصال کابل ثبت ECG	۶- دکمه روشن و خاموش دستگاه
۷- دکمه فهرست تنظیمات دستگاه	۸- دکمه انتخاب حالت ثبت	۹- دکمه شروع /پایان پرینت ECG

نحوه ثبت ECG با دستگاه ZONECARE ZQ-1203G

- ۱- لیدها را به بیمار متصل نمایید.
 - ۲- دستگاه را روشن کنید.
 - ۳- از طریق دکمه mode حالت دستی یا خودکار را انتخاب کنید.
 - ۴- دکمه ۹ را فشار دهید تا دستگاه شروع به چاپ سیگنال ثبت شده نماید.
- ✓ بهره و سرعت استاندارد جهت ثبت نوار قلب 10 mm/mV و 25 mm/s می باشد.

نکات قابل توجه جهت نگهداری پیشگیرانه و ثبت بهتر نوار قلب

- ۱- بیمار باید فاقد هرگونه وسیله فلزی به خصوص گردنبند، دستبند و یا انگشتر باشد.
- ۲- به بیمار گوشزد شود که فاقد حرکت باشد.
- ۳- جهت تنظیف الکترودها و کابل بیمار از اسفنج یا پارچه نمدار آغشته به الکل رقیق شده استفاده گردد.
- ۴- جهت نظافت دستگاه از پارچه نمدار با محلول روتین بیمارستان استفاده کنید و به هیچ عنوان محلول را مستقیم بر روی دستگاه نریزید.