


راهنمای کاربری دستگاه نوار قلب KENZ ECG108

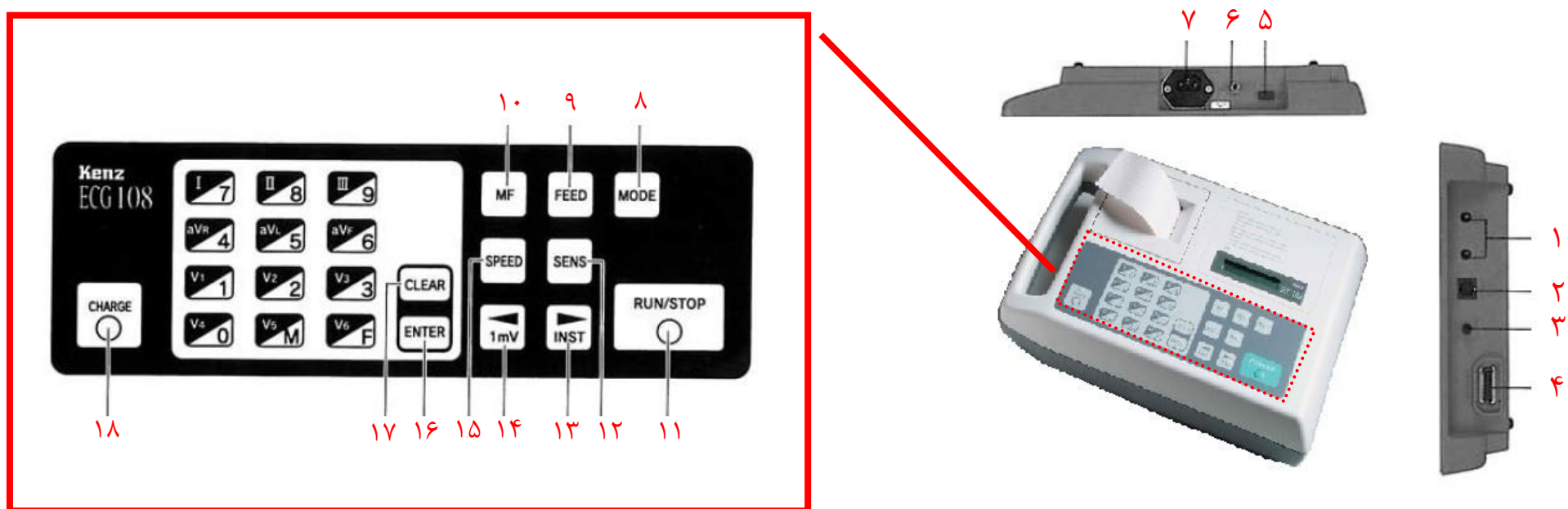

۱- ورودی و خروجی سیگنال آنالوگ	۲- درگاه اتصال صفحه کلید	۳- کلید تنظیم روشنایی صفحه نمایش
۴- درگاه اتصال کابل ثبت ECG	۵- کلید روشن / خاموش	۶- محل اتصال کابل زمین
۷- درگاه اتصال کابل تغذیه	۸- انتخاب حالت ثبت	۹- پرینت ECG از نقطه مورد نظر
۱۰- جهت فعاسازی فیلتر لرزش عضلانی *	۱۱- کلید شروع / پایان ثبت	۱۲- تنظیم بهره دستگاه (2.5 , 5 , 10 , 20 mm/mV)
۱۳- تمامی پارامترهای تنظیمی را به حالت اولیه باز می گرداند	۱۴- ارسال موج کالیبره مربعی	۱۵- تنظیم سرعت ثبت (5,25,50 mm/second)
۱۶- جهت ورود اطلاعات بیمار استفاده می گردد	۱۷- جهت پاک کردن اطلاعات بیمار استفاده می گردد	۱۸- وضعیت شارژ باتری

نحوه ثبت ECG با دستگاه KENZ ECG108

- ۱- لیدها را به بیمار متصل نمایید.
 - ۲- دستگاه را روشن کنید.
 - ۳- از طریق دکمه mode حالت دستی یا خودکار را انتخاب کنید.
 - ۴- دکمه RUN را فشار دهید تا دستگاه شروع به ثبت نماید.
- ✓ بهره و سرعت استاندارد جهت ثبت نوار قلب 10 mm/mV و 25 mm/s می باشد.

نکات قابل توجه جهت نگهداری پیشگیرانه و ثبت بهتر نوار قلب

- ۱- بیمار باید فاقد هرگونه وسیله فلزی به خصوص گردنبند، دستبند و یا انگشتر باشد.
- ۲- به بیمار گوشزد شود که فاقد حرکت باشد.
- ۳- جهت تنظیم الکترودها و کابل بیمار از اسفنج یا پارچه نمدار آغشته به الکل رقیق شده استفاده گردد.
- ۴- جهت نظافت دستگاه از پارچه نمدار با محلول روتین بیمارستان استفاده کنید و به هیچ عنوان محلول را مستقیم بر روی دستگاه نریزید.

* دو حالت MF1 و MF2 وجود دارد:

حالت MF1 برای لرزش و انقباض عضلانی ضعیف و حالت MF2 برای لرزش و انقباض عضلانی قوی استفاده می گردد.