



Novin S1800 Quick Reference




برای جزئیات بیشتر به دفترچه راهنمای کاربری دستگاه مراجعه شود.


راهنما سریع کاربری فقط برای کاربران حرفه ای و مسلط به کاربری و استفاده از دستگاه (و ملحقات و ضمائم) که قبلاً دفترچه راهنمای کاربری دستگاه را مطالعه نموده اند، کاربرد دارد.



کانکتورهای پلیت کناری دستگاه

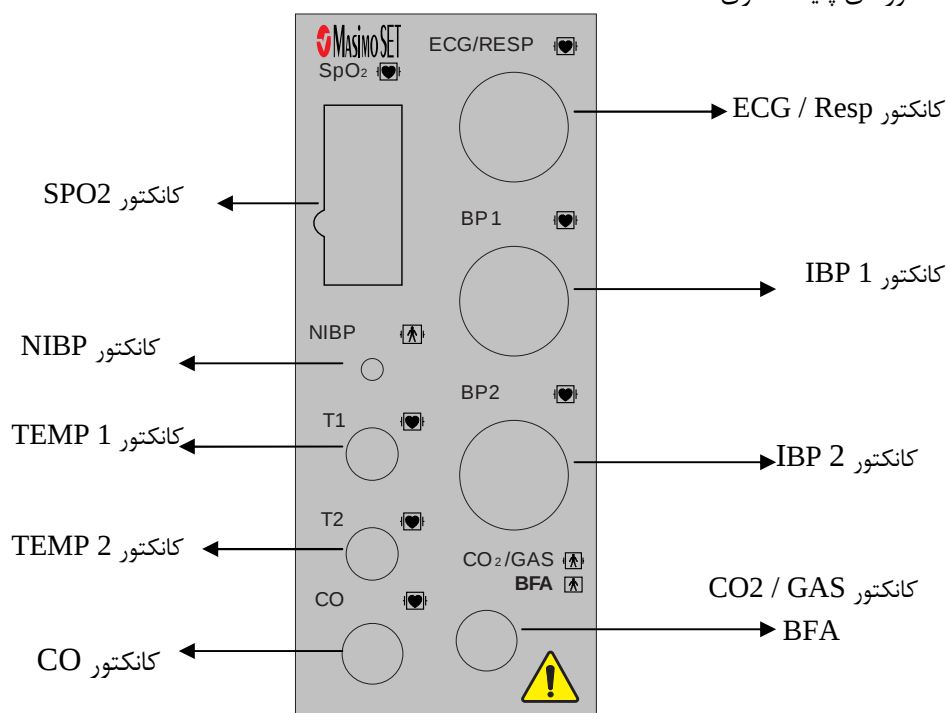

راهنمای کلیدها و نشانگرها

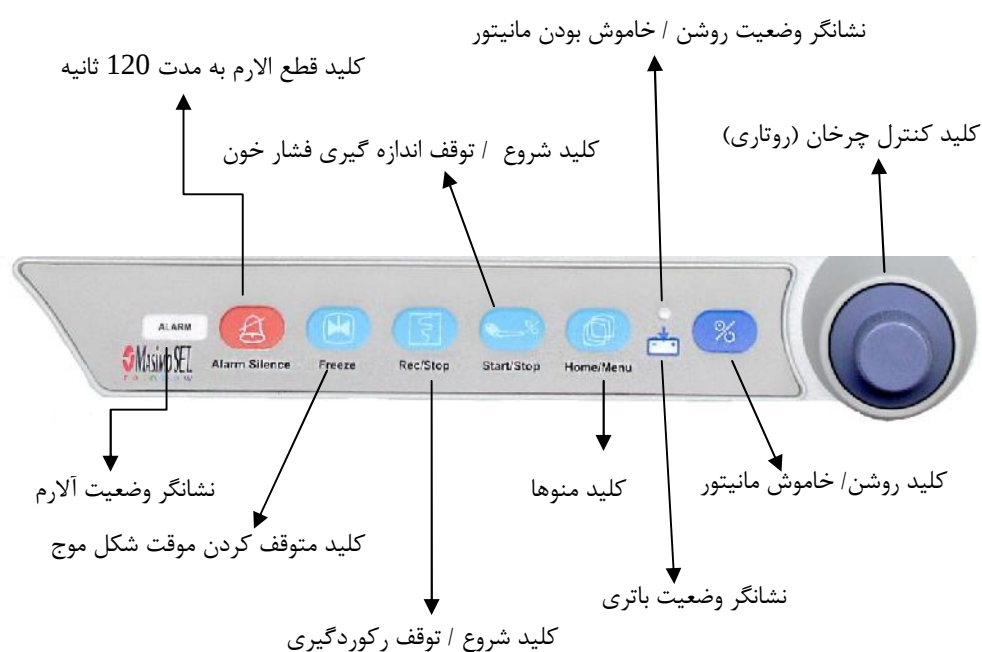

هشدارها و نکات مربوط به تمیز و ضدعفونی کردن دستگاه و اکسسوری:

- اگر اپراتور بازدیدهای دوره‌ای بر روی سیستم را انجام ندهد ممکن است بعد از مدتی دقت سیستم کم شود و سلامتی بیمار را به خطر بیاندازد.
- قبل از تمیز کردن مانیتور و یا سنسورها از خاموش بودن سیستم و جدا بودن آن از برق شهر اطمینان حاصل کنید.
- مواد ضدعفونی پیشنهادی: هیدروژن پروکساید 3٪، الکل 70٪، ایزوپروپانول، انپروپانول
- از مواد شوینده‌ای که دارای آمونیاک و یا استون هستند، استفاده نکنید.
- بیشتر مواد شوینده در هنگام استفاده باید رقیق شود.
- مواد شوینده باقی مانده را خشک نمایید.
- مواظب باشید مواد شوینده داخل کیس سیستم نشود.
- برای تمیز کردن از وسایل زبر مانند پارچه فلزی یا سیم ظرفشویی خودداری کنید.
- سنسورهای دما را هرگز در آب جوش قرار ندهید.
- ترنسدیوسر IBP رادر اتوکلاو قرار ندهید و آن را با ETO استریل نکنید.
- از ETO برای ضد عفونی کردن مانیتور استفاده نکنید.
- از تمیز کردن رکوردر بلافاصله بعد از رکوردگیری به دلیل داغ شدن هد و محیط اطراف آن خودداری کنید.
- ماژول BFA را به وسیله اتانول بیمارستانی تمیز و سپس به وسیله یک دستمال خشک کنید.



- سیستم مانیتورینگ علائم حیاتی یک وسیله کمکی برای ارزیابی وضعیت بیمار می باشد. برای اطمینان بیشتر باید همواره در کنار آن از علائم و نشانه های بالینی بیمار نیز استفاده شود.
- در هنگام استفاده از دستگاه الکتروشوک از تماس با بدن بیمار یا تخت یا سیستم های متصل به بیمار خودداری کنید.
- هرگاه تعداد زیادی سیستم بطور همزمان با سیستم مانیتور به مریض وصل شود، امکان افزایش جریان نشستی از حد قابل قبول وجود دارد.
- برای اطمینان از رعایت مسائل ایمنی و زمین شدن مناسب سیستم باید بدنه مانیتور و سایر تجهیزات متصل به آن هم پتانسیل شوند.
- آلارم ها باید متناسب با شرایط هر بیمار تنظیم شود. قبل از کار کردن با سیستم از سالم بودن سیستم و آلارم صوتی آن در هنگام وقوع آلارم اطمینان حاصل کنید.
- به منظور جلوگیری از تاثیر EMC از قرار دادن مانیتور در مجاورت سیستم دیگر و یا روی سیستم دیگر خودداری کنید و در صورتی که مجبور به انجام این کار شدید از صحت عملکرد سیستم اطمینان حاصل کنید.
- برای استفاده از حداکثر عمر مفید باتری توصیه می‌شود که حداقل هر یک ماه یک بار مانیتور با باتری کار کند تا جایی که باتری کاملاً دشارژ شده و سیستم خاموش شود و بعد از آن دوباره سیستم را شارژ کنید.

تنظیمات قبل از شروع مانیتورینگ :

- وارد کردن اطلاعات بیمار در قسمت PATIENT INFORMATION
- انتخاب مد بیمار (Adult / Neonate / Pediatric) قبل از اندازه گیری فشار
- تنظیم واحد اندازه گیری فشار
- تنظیم صدای آلارم
- محدوده آلارم
- عملیات Zeroing قبل از اندازه گیری IBP
- تنظیمات پالس اکسیمتری
- تنظیمات Resp

