
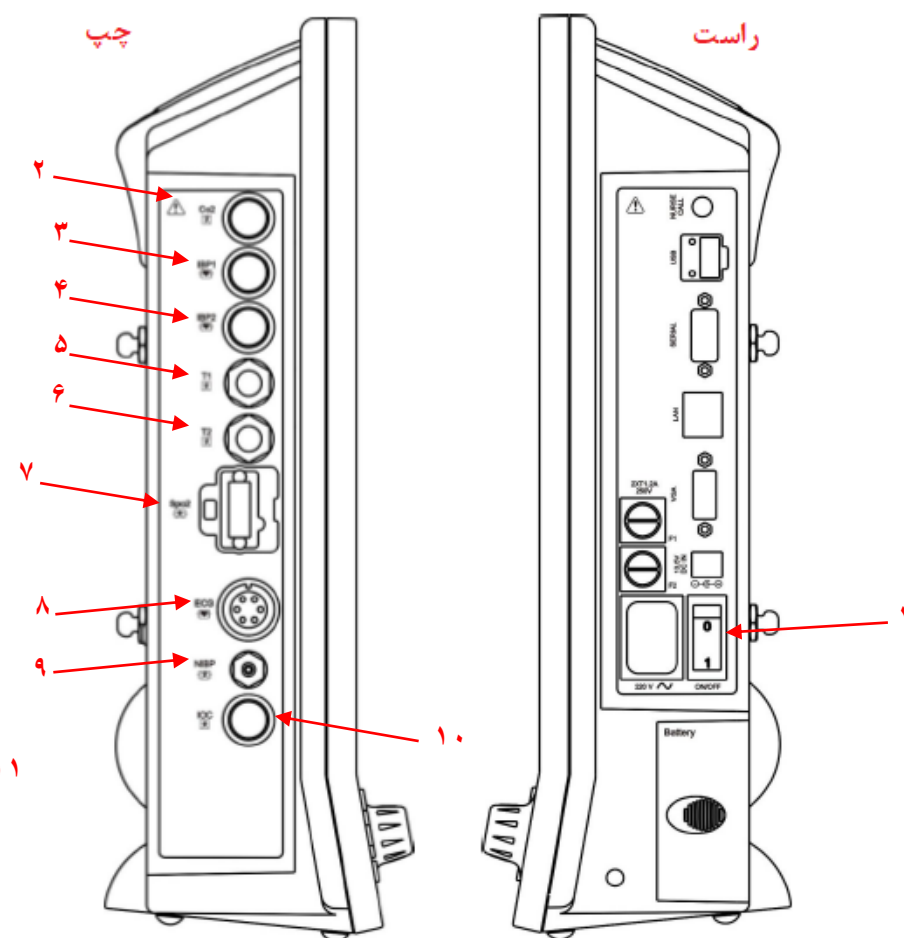


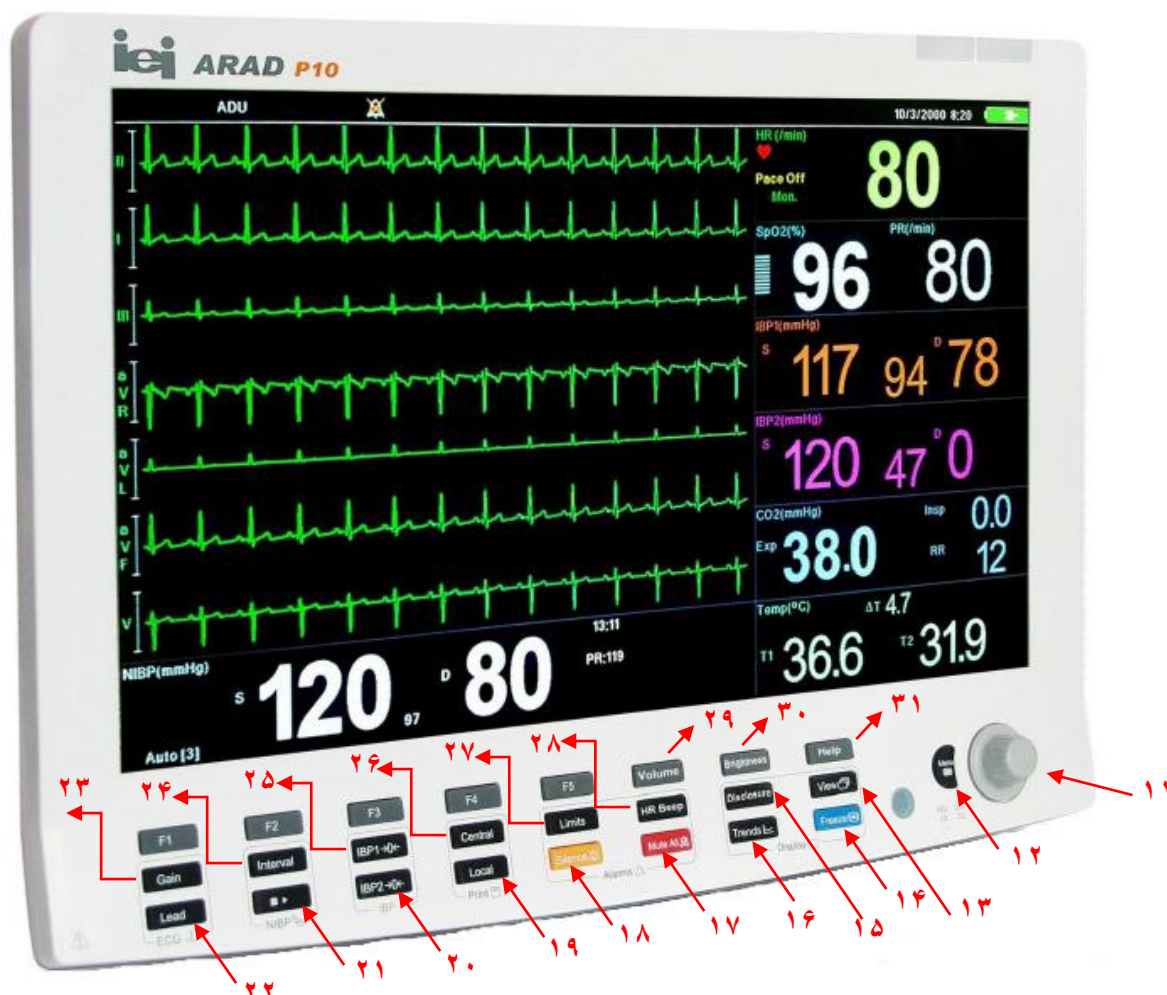

۱ - کلید روشن/خاموش	۲ - محل نصب سنسور سنجش Co2	۳ و ۴ - محل نصب سنسور IBP
۵ و ۶ - محل نصب سنسور دما	۷ - محل نصب سنسور پالس اکسی متر	۸ - محل نصب سنسور ECG
۹ - محل نصب لوله رابط کاف NIBP	۱۰ - محل نصب سنسور ماژول عمق بیهوشی (Ioc)	۱۱ - کلید روتاری دستگاه
۱۲ - دکمه نمایش منوی اصلی دستگاه	۱۳ - دکمه تغییر پارامترهای نمایش بر روی دستگاه	۱۴ - توقف سیگنال های نمایشی بر روی دستگاه
۱۵ - نمایش ECG ذخیره شده	۱۶ - نمایش نمودار کلیه پارامترهای دستگاه از ۹۶ ساعت قبل	۱۷ - غیر فعالسازی تمامی آلارم ها بجز Apnea
۱۸ - توقف آلارم صوتی به مدت ۲ دقیقه / فعالسازی مجدد	۱۹ - پرینت سیگنال به صورت Local	۲۰ و ۲۵ - دسترسی سریع جهت صفر نمودن IBP
۲۱ - شروع و توقف ثبت NIBP	۲۲ - تغییر لید در ثبت ECG	۲۳ - تنظیم بهره ECG
۲۴ - اندازه گیری NIBP در فاصله زمانی مشخص (خودکار)	۲۶ - ارسال سیگنال به مانیتور سانترال	۲۷ - تعیین حد بالا و پایین پارامترها جهت آلارم ها
۲۸ - روشن و خاموش صدای بوق در هر ضربان	۲۹ - تنظیم میزان صدای بلندگو	۳۰ - تنظیم میزان روشنایی صفحه نمایش
۳۱ - راهنمای استفاده از منوهای دستگاه (به زبان انگلیسی)		

ملاحظات کاربری:

- در طول استفاده از الکتروشوک، مانیتور، تخت و بیمار را لمس نکنید.
- استفاده همزمان از مانیتور و الکتروکوتر موجب اختلال در سیگنال ECG می گردد. بدین ترتیب اعداد و ارقام قرائت شده توسط مانیتور قابل اعتماد نخواهد بود.
- دستگاه در هر زمان تنها باید به یک بیمار متصل باشد.
- در صورت عدم آشنایی با دستگاه و یا نیاز به اعمال تنظیمات بیشتر دفترچه راهنمای آن را از واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان دریافت و مطالعه نمایید.

ملاحظات نگهداشت پیشگیرانه:

- پیش از تمیز کردن و اسکراب دستگاه را خاموش و از برق خارج کنید.
- جهت تمیز کردن و انجام اسکراب به هیچ عنوان مایعات را مستقیم بر روی دستگاه نریزید.
- جهت تمیز کردن و انجام اسکراب پارچه را با محلول ضد عفونی مجاز مرطوب و از آن استفاده نمایید.
- پس از انجام عملیات تنظیف و اسکراب تجهیز را حداقل به مدت ۱۵ دقیقه به برق متصل نکنید.
- هنگام تمیز کردن سنسورها، حجم زیادی از مایعات را که باعث نفوذ به آن می شود، بکار نبرید.
- زمانی که دستگاه را از یک مکان سرد و مرطوب به یک مکان گرم منتقل می کنید، به دستگاه فرصت دهید تا گرم و خشک شود.
- اگر کاف NIBP را داخل محلول پاک کننده یا ضد عفونی کننده می اندازید، منافذ و سوراخ های آن باید مسدود شوند تا مایعات به داخل آن نفوذ نکنند.
- از زدن سیم برق دستگاه به پریزی که در مدار وسایل دیگری مانند دستگاه تهویه قرار دارد و مرتب در حال روشن و خاموش شدن است، اجتناب کنید.